

# VISIONX DEMOKUFFERT



Du har nu modtaget en VISIONX demokuffert, så du kan se og prøve VISIONX lup med de 2 forskellige stel, samt se de mange farver.

Første lag du ser her i pakken, er CURVED stellet, andet lag du ser er TITANIUM stellet og tilbehør.

## **Demokufferten indeholder følgende:**

- 6xCURVED stel alle 6 farver
- 1xCURVED stel med VisionX Lup 3.0
- 1xCURVED stel med VisionX Lup 3.8
- 3xTITANIUM stel alle 3 farver
- 1xTITANIUM stel med VisionX Lup 3.0
- 1xCIRCLE lup lys
- 1xLup lys batteri
- 1xStropper til briller
- 2xNæseklæmmer til CURVED stel
- 1xMålebånd

Når du har valgt dit stel og farven der passer til dig, så kommer du til opmålingen, så din VISIONX lup kommer til, at passe helt perfekt til dig. Derved får du en ergonomisk god arbejdsstilling, når du arbejder med lupbrillerne.

## **Fokusafstand i cm.**

Her måles afstanden fra behandleren's øje til patientens fortænder.

Brillebærer skal sidde i normal behandlings-position, med patienten liggende i patientstolen. Tredje person måler fokusafstand i cm fra brillebærers øje til patientens mund med et målebånd.

## **Brillekort/Brillepas fåes ved egen optikker.**

Hvis du har et Brillekort der er mindre end 6 måneder gammelt, kan dette godt bruges. Vejledende pris ved Louis Nielsen for brillekort 245,- inkl. moms

## **Brillestyrke i brilleglasset omkring luppen.**

Bruger du normalt briller skal du indtaste, om din styrke er mindre end plus/minus 3 eller højere end plus/minus 3.

Bestil dine lupbriller her

[WWW.VISIONX.NU](http://WWW.VISIONX.NU)

# SÅDAN BESTILLER DU DINE VISIONX LUPBRILLER

Behold dette papir på klinikken, til når du skal bestille dine lupbriller.

1. Du starter med at gå ind på [www.visionx.nu](http://www.visionx.nu)
2. Så trykker du på **SHOP**, her vælger du om det skal være det **CURVED** eller **TITANIUM** stel og derefter hvilken farve du ønsker.
3. Når du har valgt hvilken farve du ønsker, kan du nu indtaste dine indsamlede oplysninger.

Indtast fokusafstand, afstanden fra behandlerens øje til patientens mund

#### Fokusafstand i cm \*

Her måles afstanden fra behandlerens øje til patientens fortænder. Brillebærer skal sidde i normal behandlings-position, med patienten liggende i patientstolen.

Tredje person måler fokusafstand i cm fra brillebærers øje til patientens mund med et målebånd.

2 characters remaining

Anskaf et brillekort/brillepas og upload filen.

#### Brillekort/brillepas \*

Her tilføjer du dit brillekort/brillepas fra optikeren.

(max file size 256 MB)

Hvis du normalt bruger briller skal du indtaste, om din styrke er mindre end plus/minus 3 eller højere end plus/minus 3.

#### Brillestyrke i glasset omkring luppen \*

Bruger du normalt briller skal du her vælge i dette felt, hvis din styrke er op til eller større end plus 3/ minus 3. Dette er blot fordi der er et tillæg til brillens pris.

Styrken fra dit brillekort, bliver lagt ind i brilleglasset.

Indtast Fokusafstand i glasset omkring luppen.

#### Fokusafstand i glasset omkring luppen

Her vælger du i hvilken afstand du ønsker at se skarpt, i glasset omkring luppen.

- 40 cm (nærområde)
- 60 cm (bakke område)
- 100 cm (Pc område)

Bruger du kontaktlinser, indtast dette her.

#### Hvis du bruger kontaktlinser

Hvis du bruger kontaktlinser skal du angive styrken her for dit venstre og dit højre øje (eks. +1 og +1):

Mål din egen højde og indtast det her.

#### Din højde \*

Mål din højde, mens du står op og skriv det i feltet her. Dette hjælper til tjekke dine brille mål er korrekte.

7 characters remaining

Hvis du er færdig med at indtaste alle oplysninger, så gå til kassen og færdiggør bestillingen med oplysninger om dig og evt. rabatkode.